

# exbio

## rCor a 1 (f428)

25 testů | Kat. č. ED7672

**Pouze pro výzkumné účely. Nepoužívat pro diagnostické účely nebo terapeutické procedury.**

Technický list (CS)

Verze: ED7672\_TDS\_v2\_CS

Datum vydání: 01-03-2023

### Zamýšlené použití

Reagencie je určena pro *in vitro* stimulaci bazofilních granulocytů (bazofilů) ve zkumavce na jedno použití. Reagencie je optimalizována pro test aktivace bazofilů za použití soupravy BasoFlowEx Kit, kat. č. ED7043 (EXBIO) pomocí průtokové cytometrie.

### Poskytované materiály

#### Obsah

25 uzavřených zkumavek na jedno použití (12 x 75 mm), z nichž každá obsahuje lyofilizovaný alergen.

#### Složení

Příprava	Purifikovaný rekombinantní protein. Lyofilizováno z 0,2 µm filtrovaného roztoku alergenu v PBS s ochrannými přísadami.
Množství	2,2 ng

#### Specifikace

Název alergenu	rCor a 1.0401
Zdroj alergenu	<i>Corylus avellana</i>

### Skladování a manipulace

Skladujte při teplotě 20-30 °C.

Vyhňte se dlouhodobé expozici na světlo.

Udržujte v suchu.

**UPOZORNĚNÍ:** Produkt je citlivý na vlhkost. Fóliový sáček otevírejte bezprostředně před prvním použitím.



Po prvním otevření skladujte zbývající nepoužité zkumavky v pečlivě uzavřeném fóliovém sáčku pomocí zipového uzávěru.

Po prvním otevření spotřebujte zbývající zkumavky s alergenem do 12 měsíců.

### Výstrahy, opatření a omezení

#### GHS klasifikace nebezpečnosti

Úplné informace o rizicích, která představují chemické látky a směsi obsažené v tomto výrobku a o tom, jak s nimi zacházet a jak je likvidovat, naleznete v Bezpečnostním listu (SDS), který je k dispozici na [www.exbio.cz](http://www.exbio.cz).

#### Biologické riziko

Lidské biologické vzorky, krevní vzorky a jakékoliv materiály, které s nimi přicházejí do kontaktu, jsou vždy považovány za infekční.

Používejte osobní ochranné a bezpečnostní pomůcky, abyste zabránili kontaktu s kůží, očima a sliznicemi.

Dodržujte všechny platné zákony, předpisy a postupy pro manipulaci a likvidaci infekčních materiálů.

#### Projevy znehodnocení

Normální vzhled dodané reagencie je bílá pecička na dně zkumavky. Nepoužívejte, pokud pozorujete jakoukoli změnu vzhledu, např. stopy vlhkosti uvnitř zkumavky.

#### Omezení použití

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítcích výrobku.

Testovací zkumavky nepoužívejte opakovaně.

#### Postup

Test aktivace bazofilů (BAT) provádějte podle návodu k použití soupravy BasoFlowEx Kit, kat. č. ED7043 (EXBIO).

**UPOZORNĚNÍ:** Alergen se může uvolnit ze dna zkumavky kvůli drsným přepravním podmínkám.



Centrifugujte jednorázovou testovací zkumavku s alergenem po dobu **1 min. při 200 x g** těsně před vlastním provedením testu aktivace bazofilů.

### Odkazy

#### Informace o nomenklatuře alergenů

- Allergen Nomenclature. WHO/IUIS Allergen Nomenclature Sub-Committee. <http://www.allergen.org/>
- The Allergome Platform. <http://allergome.org/>

#### Výrobce

EXBIO Praha, a.s.

Nad Safinou II 341

25250 Vestec

Czech Republic

#### Kontaktní informace

[info@exbio.cz](mailto:info@exbio.cz)

[technical@exbio.cz](mailto:technical@exbio.cz)

[orders@exbio.cz](mailto:orders@exbio.cz)

[www.exbio.cz](http://www.exbio.cz)

#### Symboly

Slovníček symbolů použitých na obalech a k označení produktu je k dispozici na [www.exbio.cz](http://www.exbio.cz).