

# exbio

## CD34 QuantiFlowEx-Kit 50 Tests | Kat. Nr. ED7080

















**IVD** **CE** 2265

### Gebrauchsanweisung (DE)

Version: ED7080\_IFU\_v5\_DE

Ausgabedatum: 24.10.2024

#### In der Gerätekennzeichnung verwendete Symbole

	Medizinisches Produkt für die In-Vitro-Diagnose		Temperaturgrenze
	CE-Kennzeichnung ID-Nummer der benannten Stelle		Von Sonneneinstrahlung fernhalten
	Hersteller		Trocken aufbewahren Von Regen fernhalten
	Eindeutige Gerätekennung		Achtung
	Gebrauchsanweisung beachten		Konzentrierte Lösung (10x)
	Ausreichend für <n> Tests		Inhalt
	Katalognummer		UKCA-Zeichen
	Chargencode		
	Verfallsdatum		

## 1. Verwendungszweck

Das CD34 QuantiFlowEx Kit ist für den Nachweis und die Auszählung der gesamten lebensfähigen hämatopoetischen Stammzellen aus den gesamten lebensfähigen Leukozyten in menschlichen Blut- und Gewebeproben mittels Durchflusszytometrie bestimmt.

### Was wird nachgewiesen und/oder gemessen?

Das Gerät CD34 QuantiFlowEx Kit erkennt und misst relative Prozentsätze und absolute Zahlen menschlicher lebensfähiger hämatopoetischer Stammzellen (CD34+CD45dim).

### Funktion des Produkts

Das Gerät ist für die Überwachung der Anzahl hämatopoetischer Stammzellen in peripherem Blut, Knochenmark und Leukaphereseprodukten bestimmt.

### Kontext eines physiologischen oder pathologischen Zustands

Eine genaue Bestimmung der Anzahl hämatopoetischer Stammzellen (HSCs) in menschlichen Blut- und Gewebeproben oder Gewebeproben zur Transplantation ist für die Patientenversorgung oder Transplantatverarbeitung erforderlich <sup>(1)</sup>.

### Art des Tests

Nicht automatisiert

Quantitativ

### Art der benötigten Probe

Normales peripheres Blut, mobilisiertes peripheres Blut, Leukaphereseprodukt(e) oder Knochenmark.

### Testpopulation

Nicht für eine bestimmte Population bestimmt.

## 2. Vorgesehener Benutzer

Das Gerät ist nur für den professionellen Einsatz im Labor bestimmt. Nicht für patientennahe Tests oder Selbsttests geeignet.

### Anforderungen an die Qualifikation

Der vorgesehene Benutzer muss über aktuelle Fachkenntnisse in der Durchflusszytometrie-Analyse menschlicher Zellen, standardmäßige Labortechniken, einschließlich Pipettieren, sowie den sicheren und korrekten Umgang mit Proben aus dem menschlichen Körper verfügen.

Der vorgesehene Benutzer muss die Norm EN ISO 15189 oder ggf. andere nationale Normen einhalten.

### 3. Testprinzip

Das Testprinzip beruht auf dem Nachweis der Bindung eines monoklonalen Antikörpers an ein spezifisches Molekül (Antigen), das von bestimmten menschlichen Blutzellen exprimiert wird. Die in dem Test verwendeten monoklonalen Antikörper sind mit verschiedenen Fluorochromen markiert, die durch einen Laserstrahl eines Durchflusszytometers während der Erfassung einer mit Antikörpern gefärbten Blutprobe angeregt werden. Die anschließend erzeugte Fluoreszenz (Lichtemission) der einzelnen Fluorochrome auf einer aufgenommenen Blutzelle wird vom Gerät erfasst und analysiert. Die Stärke der Fluoreszenz ist direkt proportional zur Dichte der Antigenexpression in einer Zelle und ermöglicht die Trennung verschiedener Zelluntergruppen.

7-AAD ist ein zellmembran-impermeabler Farbstoff, der von lebensfähigen Zellen ausgeschlossen wird und sich in nicht lebensfähigen Zellen an die DNA bindet. Durch Unterschiede in der Fluoreszenzintensität der Zellen können nicht lebensfähige Zellen von der Analyse ausgeschlossen werden.

### 4. Bereitgestellte Reagenzien

#### Inhalt

Das Gerät CD34 QuantiFlowEx Kit reicht für 50 Tests und wird mit folgenden Reagenzien geliefert:

**Staining Reagent** (ED7080-1; 1 Fläschchen) mit 1 ml einer vorgemischten Kombination von mit Fluorochromen markierten monoklonalen Antikörpern CD45 FITC und CD34 PE, die bei optimaler Konzentration in einer stabilisierenden phosphatgepufferten Kochsalzlösung (PBS) mit 15 mM Natriumazid verdünnt wurden, siehe Tabelle 1.

**7-AAD** (ED7080-2; 1 Fläschchen) mit 1 ml 7- Aminoactinomycin D (7-AAD), einem Zelllebensfähigkeitsfarbstoff, der in optimaler Konzentration in einer stabilisierenden phosphatgepufferten Kochsalzlösung (PBS) mit 15 mM Natriumazid verdünnt wurde.

**Lysing Solution** (ED7080-3; 1 Fläschchen) mit 15 ml konzentrierter (10X) gepufferter Lösung auf Ammoniumchloridbasis ohne Fixiermittel.

#### Zusammensetzung

**Tabelle 1** Beschreibung und Konzentrationen der Wirkstoffe

Antigen	Fluorochrom	Klon	Isotyp	Konzentration (µg/ml)
CD45	FITC	MEM-28	IgG1	30
CD34	PE	4H11 [APG]	IgG1	35

## 5. Erforderliche, aber nicht bereitgestellte Materialien

### Sowohl für die Einzel- als auch für die Doppelplattformmethode

Reagenzgläser mit Rundboden (12 x 75 mm)

Deionisiertes Wasser (Reagenzienqualität)

Prozesskontrollzellen (Streck CD-Chex CD34<sup>®</sup>, CD34-Kontrolle – 3 Ebenen, Kat. Nr. 213337, 213347, 213383 oder gleichwertige lysierbare Zellkontrolle mit vordefinierter CD34-HSC-Anzahl)

### Nur für die Einzelplattformmethode

Fluoreszierender Zellzahlstandard

- zur Verwendung mit Becton-Dickinson-Zytometern
  - o BD Trucount™ Röhrchen
- zur Verwendung mit Beckman-Coulter-Zytometern
  - o Beckman-Coulter-Flow-Count™ Fluorospheres

## 6. Erforderliche Ausrüstung

### Sowohl für die Einzel- als auch für die Doppelplattformmethode

Automatische Pipette mit Einwegspitzen (20–100 µl) zum Pipettieren der Proben und Reagenzien

Flüssigkeitsspender oder Pipette mit Einwegspitzen (2 ml) für die Abgabe der Erythrozytenlyselösung

Counting Beads (TruCount™ Röhrchen (BD Biosciences; Ref. Nr. 663028), FlowCount Fluorospheres (Beckman Coulter; Ref. Nr. 7547053)

Vortex-Mixer

Durchflusszytometer mit einer Laseranregungsquelle (488 nm), Detektoren für Streulicht, optische Filter und Emissionsdetektoren, die für die Erfassung der Signale der in Tabelle 2 aufgeführten Fluorochrome ausgelegt sind.

**Tabelle 2** Spektrumscharakteristik der in dem Gerät verwendeten Fluorochrome

Fluorochrom	Anregung [nm]	Emission [nm]
FITC	488	525
PE	488	576
7-AAD	488	670

**HINWEIS:** Das Gerät wurde auf den Durchflusszytometern BD FACSCanto™ II und BD FACSLyric™ (BD Biosciences), Navios (Beckman Coulter) und XF-1600™ (Sysmex) getestet.

### **Nur für die Doppelplattformmethode**

Hämatologie-Analysegerät (für absolute Zellzahlen), das die Anzahl der weißen Blutkörperchen (WBC) und der Lymphozyten pro  $\mu\text{l}$  der Probe bestimmen kann.

## **7. Lagerung und Handhabung**

Bei 2–8 °C aufbewahren.

Längere Lichteinwirkung vermeiden.

Nicht einfrieren.

Informationen zur Stabilität beim Gebrauch und zur Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen sowie zu den Lagerungsbedingungen und der Stabilität von Arbeitslösungen (falls zutreffend) sind in Abschnitt 10 „Vorgehensweise (Reagenzienvorbereitung)“ zu finden.

## **8. Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen bei der Anwendung**

### **GHS-Gefahrenklassifizierung**

Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt (Safety Data Sheet/SDS) auf der Produktseite auf [www.exbio.cz](http://www.exbio.cz). Dort finden Sie alle Informationen zu den Risiken, die von den im Produkt enthaltenen chemischen Stoffen und Gemischen ausgehen, und dazu, wie diese gehandhabt und entsorgt werden sollten.

### **Biologisches Risiko**

Menschliche biologische Proben und Blutproben sowie alle damit in Kontakt kommenden Materialien werden immer als infektiöses Material betrachtet.

Verwenden Sie eine persönliche Schutz- und Sicherheitsausrüstung, um den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten zu vermeiden.

Befolgen Sie alle geltenden Gesetze, Vorschriften und Verfahren für den Umgang mit und die Entsorgung von infektiösem Material.

### **Anzeichen von Verfall**

Die mitgelieferten Reagenzien sind normalerweise eine klare Flüssigkeit.

Verwenden Sie das Reagenz nicht, falls Sie eine Veränderung des Aussehens beobachten, z. B. Trübungen oder Anzeichen von Ausfällungen.

### **Beschränkung der Verwendung**

Das Produkt darf nicht nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum verwendet werden.

## 9. Probe

Verwenden Sie Blut oder Gewebematerial, das in einem als Medizinprodukt eingestuften Probenbehälter mit dem Antikoagulans EDTA, Heparin oder ACD (Acid Citrat Dextrose) entnommen wurde.

Folgende Proben können mit dem Gerät analysiert werden:

normales und mobilisiertes peripheres Blut, Leukaphereseprodukte und Knochenmark.

**HINWEIS:** Bestimmen Sie bei der Doppelplattformanalyse die absolute Leukozytenzahl in der entnommenen Probe mit einem Hämatologie-Analysegerät. Das Gerät CD34 QuantiFlowEx Kit allein ermöglicht keine Zählung der absoluten Zellzahlen.

Verarbeiten Sie die Probe spätestens 24 Stunden nach der Entnahme.

### Endogene Interferenz

Basierend auf wissenschaftlicher Literaturrecherche werden endogene Störquellen in Tabelle 3 identifiziert.

**Tabelle 3** Endogene Interferenz des Geräts

Endogene Interferenz	Auswirkungen	Referenz
Albumin	Albumin kann in hohen Konzentrationen aufgrund seiner Fähigkeit, große Mengen an Liganden zu binden und freizusetzen, störend wirken.	2, 3, 4
Bilirubin (Ikterus) (unkonjugiert)	Bilirubin kann aufgrund seiner hohen Autofluoreszenz den Fluoreszenzhintergrund von Zellen erhöhen.	5, 6, 7
Zelltrümmer (nach Lyse)	Zelltrümmer können zu ungenauen Zellzahlen führen und die Antikörper im Gerät verringern.	8, 9
Erythrozyten	Unzureichende Lyse, in der Probe vorhandene rote Blutkörperchen können zu einer fehlerhaften Zellzählung führen.	6
Hämoglobin	Hämolysierte Proben können zu fehlerhaften Ergebnissen führen.	10
Menschliche Anti-Murine-Antikörper	Eine Behandlung mit monoklonalen Antikörpern kann zu fehlerhaften Ergebnissen führen (Fähigkeit zur Bindung an Zelloberflächen-Antigene).	11, 12, 13, 14, 15, 16
Immunglobuline	Können nicht ausgewaschen werden und	8

	fehlerhafte Zählungen von Lymphozyten-Untergruppen ergeben.	
Rheumafaktoren	Das Vorhandensein von RF beeinträchtigt MIA (Multiplex-Immunoassays).	17
Triglyceride	Hohe zirkulierende Lipidwerte können die Durchflusszytometrieanalyse bestimmter Blutzellpopulationen beeinträchtigen.	18

## Exogene Interferenz

Proben, die älter als 24 Stunden sind, können zu fehlerhaften Ergebnissen führen.

Gekühlte Proben können zu fehlerhaften Ergebnissen führen.

Eine falsche Zubereitung der Erythrozytenlyselösung kann zu fehlerhaften Ergebnissen führen. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers zur Verwendung der Erythrozytenlyselösung.

## 10. Vorgehensweise

### Vorbereitung der mitgelieferten Reagenzien

#### Staining Reagent und 7-AAD

Es ist keine Vorbereitung der Reagenzien erforderlich.

Bringen Sie das Reagenz vor der Verwendung auf Raumtemperatur. Halten Sie den Primärbehälter des Produkts trocken.

Verwenden Sie das Reagenz direkt aus seinem ursprünglichen Primärbehälter.

Nach dem ersten Öffnen behält das Reagenz seine Eigenschaften bis zum Verfallsdatum, wenn es unter den angegebenen Bedingungen in seinem ursprünglichen Primärbehälter gelagert wird.

**VORSICHT:** Das Reagenz darf nicht verdünnt werden.

#### Lysing Solution

Verdünnen Sie die konzentrierte (10X) Erythrozyten-Lyselösung mit entionisiertem Wasser zur Arbeitslyselösung (1X).

**VORSICHT:** Die Arbeitslyselösung (1X) ist **nur 1 Tag** stabil. Bereiten Sie an jedem Messtag eine frische Arbeitslyselösung (1X) vor, indem Sie 1 Teil konzentrierte (10X) Lyselösung mit 9 Teilen entionisiertem Wasser mischen und im Flüssigkeitsspender oder geschlossenen Behälter bei Raumtemperatur aufbewahren.

### Vorbereitung der erforderlichen, aber nicht bereitgestellten Materialien

Befolgen Sie zur Vorbereitung und Verwendung fluoreszierender Zellzahlstandards die Anweisungen des Herstellers.

## Qualitätskontrolle

Verwenden Sie Streck CD-Chex CD34® oder gleichwertige Kontrollzellen als positive Verfahrenskontrolle, um die ordnungsgemäße Leistung des Produkts sicherzustellen. Streck CD-Chex CD34® liefert festgelegte Werte für prozentuale positive und absolute Zahlen von CD34+ HSC.

Färben Sie die Kontrollzellen mit dem CD34 QuantiFlowEx Kit gemäß der in der Gebrauchsanweisung angegebenen Probenverarbeitung. Achten Sie darauf, dass die erzielten Ergebnisse (% positive Zellen) innerhalb des für die verwendete Charge von Kontrollzellen angegebenen Erwartungsbereichs liegen.

## Probenfärbung – Einzelplattformmethode

1. Kennzeichnen Sie für jede Probe ein 12 × 75 mm großes Reagenzglas mit Rundboden mit der entsprechenden Probenbezeichnung.

**HINWEIS:** Verwenden Sie das BD Trucount™ Röhrchen als Reagenzglas für die absolute CD34-Stammzellzählung.

2. Pipettieren Sie 20 µl Staining Reagent in den Boden des 12 x 75 mm großen Reagenzglases.
3. Pipettieren Sie 20 µl 7-AAD in den Boden des 12 x 75 mm großen Reagenzglases.
4. Pipettieren Sie 100 µl der gut gemischten Probe mithilfe der umgekehrten Pipettiertechnik auf den Boden des Reagenzglases.

**VORSICHT:** Die Pipettiergenauigkeit ist für die Bestimmung der absoluten Anzahl von CD34+-Stammzellen von entscheidender Bedeutung. Daher ist die umgekehrte Pipettiertechnik mit automatischer Luftverdrängungspipette zu verwenden.

Drücken Sie den Pipettenknopf bis zum 2. Anschlag und nehmen Sie die Probe durch umgekehrtes Pipettieren auf. Platzieren Sie dann die Pipettenspitze mit der Blutprobe in der Nähe des Röhrchenbodens und drücken Sie den Pipettenknopf bis zum 1. Anschlag herunter, um die Probe abzugeben.

Pipettieren Sie das Blut nicht auf die Seiten des Teströhrchens. Wenn ein Blutausstrich oder -tropfen an der Seite des Reagenzglases verbleibt, wird er möglicherweise nicht mit dem Reagenz gefärbt oder die Erythrozyten werden nicht lysiert und das Testergebnis ist unter Umständen nicht gültig.

5. Vortexen Sie das Reagenzglas und inkubieren Sie für 20–30 Minuten bei Raumtemperatur im Dunkeln.
6. Geben Sie 2 ml der Lyse-Arbeitslösung (1X) in das Reagenzglas.
7. Vortexen Sie das Reagenzglas und inkubieren Sie für 10 Minuten bei Raumtemperatur im Dunkeln.



8. Wenn das BD Trucount™ Röhrchen nicht als Reagenzglas verwendet wurde, fügen Sie 100 µl Flow Count™ Fluorospheres unter Verwendung der umgekehrten Pipettiertechnik hinzu. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers.
9. Messen Sie die gefärbte Probe sofort mit dem Durchflusszytometer. Wird die gefärbte Probe nicht sofort gemessen, verschließen Sie das Reagenzglas, lagern Sie sie bei 2–8 °C im Dunkeln und analysieren Sie sie innerhalb von 2 Stunden.

**VORSICHT:** Vortexen Sie die gefärbte Probe unmittelbar vor der Messung auf dem Durchflusszytometer, um Ansammlungen zu vermeiden.

### **Probenfärbung – Doppelplattformmethode**

**VORSICHT:** Bestimmen Sie vor der Probenverarbeitung die absolute Leukozytenzahl in der entnommenen Probe mit einem Hämatologie-Analysegerät.

1. Kennzeichnen Sie für jede Probe ein 12 × 75 mm großes Reagenzglas mit Rundboden mit der entsprechenden Probenbezeichnung.
2. Pipettieren Sie 20 µl Staining Reagent in den Boden des 12 x 75 mm großen Reagenzglases.
3. Pipettieren Sie 20 µl 7-AAD in den Boden des 12 x 75 mm großen Reagenzglases.
4. Pipettieren Sie 100 µl der gut gemischten Probe mithilfe der umgekehrten Pipettiertechnik auf den Boden des Reagenzglases.
5. Vortexen Sie das Reagenzglas und inkubieren Sie für 20–30 Minuten bei Raumtemperatur im Dunkeln.
6. Geben Sie 2 ml der Lyse-Arbeitslösung (1X) in das Reagenzglas.
7. Vortexen Sie das Reagenzglas und inkubieren Sie für 10 Minuten bei Raumtemperatur im Dunkeln.
8. Messen Sie die gefärbte Probe sofort mit dem Durchflusszytometer. Wird die gefärbte Probe nicht sofort gemessen, verschließen Sie das Teströhrchen, lagern Sie sie bei 2–8 °C im Dunkeln und analysieren Sie sie innerhalb von 2 Stunden.

**VORSICHT:** Vortexen Sie die gefärbte Probe unmittelbar vor der Messung auf dem Durchflusszytometer, um Ansammlungen zu vermeiden.

### **Durchflusszytometrie-Analyse**

Das für die Verwendung mit dem CD34 QuantiFlowEx Kit ausgewählte Durchflusszytometer muss routinemäßig mit fluoreszierenden Mikrokügelchen kalibriert werden, um eine stabile Empfindlichkeit der Detektoren gemäß den

Anweisungen des Herstellers des Zytometers sicherzustellen.

Bei unsachgemäßer Wartung kann das Durchflusszytometer falsche Ergebnisse liefern.

Beachten Sie die Herstellerangaben des Zytometers für Laser und Fluoreszenzdetektoren entsprechend den Anregungs- und Emissionscharakteristiken der Fluorochrome in Abschnitt 6 (Erforderliche Ausrüstung).

Stellen Sie vor der Analyse der gefärbten Proben die Spannungen an den entsprechenden Fluoreszenzdetektoren ein. Die Spannung am PMT-Detektor sollte ausreichend hoch eingestellt sein, damit möglichst wenige negativ gefärbte Ereignisse den 0. Kanal auf der Fluoreszenzachse stören. Außerdem sollte die Spannung des PMT-Detektors nicht die Werte überschreiten, bei denen positive Ereignisse auf die rechte Achse gedrückt werden.

Erfassen Sie je nach Probenprobe mindestens 300.000–1.000.000 Ereignisse pro Röhrchen.

Erfassen Sie stets die Lichtstreuungsparameter der Zelle: Vorwärtsstreulicht (sowohl Signalfläche als auch Signalhöhe) und (senkrecht) Seitwärtsstreulicht (sowohl Signalfläche als auch Signalhöhe).

Für die **Einzelpattformmethode** legen Sie den Schwellenwert für die Fluoreszenz im FITC-Detektor und nicht für die Ereignisgröße für die Datenerfassung fest. Der Schwellenwert für die Vorwärtsstreuung (Ereignisgröße) kann Mikropartikelereignisse mit Zählstandard von der Analyse ausschließen, die sich negativ auf die prozentuale Bestimmung der CD34+-Stammzellen auswirken würden.

Für die **Doppelpattformmethode** legen Sie den Schwellenwert auf „Vorwärtsstreuung“ fest.

Kompensieren Sie Fluoreszenzsignale zwischen den Detektoren vor oder nach der Datenerfassung. Die Daten können falsch interpretiert werden, wenn die Fluoreszenzsignale nicht richtig kompensiert oder die Gates nicht richtig positioniert sind.

**HINWEIS:** Für die Vorbereitung der 7-AAD-Kompensationskontrolle sollten Proben mit erwartet geringer Zellebensfähigkeit verwendet werden, z. B. mit Formaldehyd-basierter Lyselösung verarbeitete Blutzellen. Proben mit hoher Zellebensfähigkeit weisen eine geringe Anzahl abgestorbener Zellen auf. Eine niedrige Anzahl toter Zellen kann sich negativ auf die mittlere 7-AAD-Fluoreszenzintensität toter Zellen auswirken und zu einer unzureichenden Kompensation führen.

Zur Analyse der Messdaten können die vom Hersteller entwickelte Zytometer-Software oder eine spezielle Software für die Offline-Analyse von Zytometriedaten

verwendet werden (z. B. FlowJo™, VenturiOne®, Infinicyt™).

### **Datenanalyse der mit dem CD34 QuantiFlowEx Kit gefärbten Probe**

Analysieren Sie gemessene und kompensierte Daten mit einer entsprechenden Software. Gating-Protokoll der International Society for Hematotherapy and Graft Engineering (ISHAGE) (Abb. 1-5) ist für die Zählung des Prozentsatzes lebender CD34+-Stammzellen anzuwenden.

Unter Verwendung von 5 Parametern (2 Lichtstreuungsparameter und 3 Fluoreszenzparameter) werden hämatopoetische CD34+-Stammzellen durch eine Kombination aus sequentiell und booleschem Gating anhand ihrer Eigenschaften identifiziert.

Echte CD34+-Stammzellen exprimieren das CD34- und CD45-Antigen, die CD45-Expression ähnelt jedoch der von Blastenzellen. Die Intensität der Färbung ist nachweisbar, jedoch geringer als beispielsweise bei Lymphozyten.


Echte CD34+-Stammzellen liefern auch ein Vorwärtsstreulicht-Signal, ähnlich wie Blastenzellen oder Lymphozyten, und weisen geringe senkrechte Lichtstreueigenschaften (Seitenstreuung) auf.

Die Abbildungen 1–5 zeigen die Reihenfolge der logischen Gatings, die eine genaue Identifizierung lebender CD34<sup>+</sup>-Stammzellen für eine genaue prozentuale Zählung gewährleisten.

Stellen Sie zunächst alle Ereignisse in einem Seitenstreuungs-Signalebereich (SSC-A) vs. 7-AAD Lebensfähigkeitsfärbung in einem Punktdiagramm dar und setzen Sie ein Gate um lebende Zellen (7-AAD negativ), wie in Region A im Bild links gezeigt.

**HINWEIS:** Bei der Verwendung einer stabilisierten Blutkontrolle wie z. B. Streck CD-Chex CD34<sup>®</sup> wird dringend empfohlen, die Lebensfähigkeit der Region A zu überprüfen und die Region gegebenenfalls neu zu positionieren, da stabilisiertes Blut Formaldehyd enthält, das die Zellmembran durchdringt, was zu einer positiven 7-AAD Lebensfähigkeitsfärbung führt.

**Abbildung 1** Das Bild links stellt die Auswahl einer lebensfähigen Population dar. Das Bild links rechts alle geschlossenen Ereignisse aus den Regionen A, B, C, G (abgeleitet von Region F) und I dar.

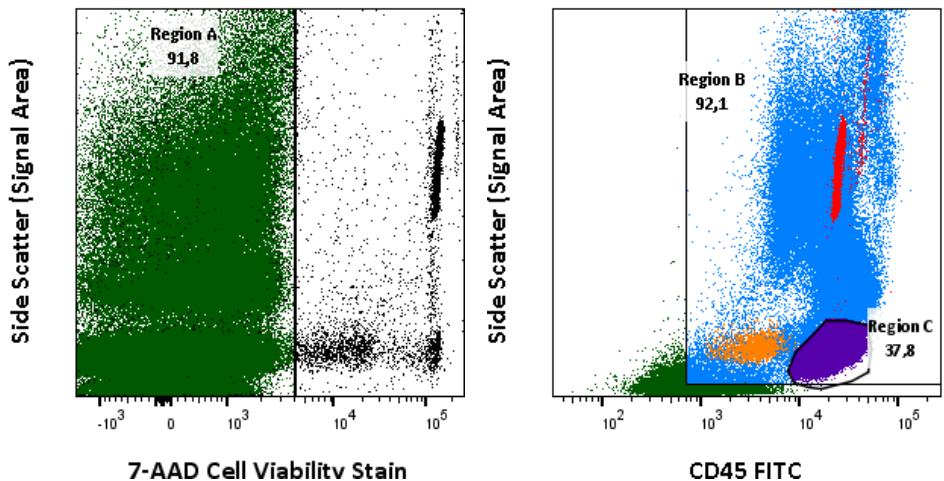


Stellen Sie Zellen aus Region A in einem SSC-A vs. CD45 FITC Punktdiagramm und setzen Sie ein Gate um **Leukozyten (Region B)** und ein Gate um **Lymphozyten**, dargestellt als **Region C**.

Bringen Sie Zellen aus Region B zu einem SSC-A vs. CD34-PE-Punktdiagramm und setzen Sie ein Gate um **CD34-positive Ereignisse (Region D)**.

Das Bild rechts zeigt **alle Ereignisse** einschließlich fluoreszierender Mikropartikel aus **Region I**, dargestellt in **Region E**. **Region E** zeigt die optischen und fluoreszierenden Eigenschaften des im BD TruCount™-Röhrchen vorhandenen fluoreszierenden Mikropartikel-Zahlstandards an (nur für die Einzelplattformmethode).


**Abbildung 2** Das Bild links stellt die Auswahl lebensfähiger Leukozyten- (Region B) und Lymphozytenpopulationen (Region C) dar. Das Bild rechts visualisiert lebensfähige CD34-positive Ereignisse (Region D), die aus Leukozyten (Region B) ausgewählt wurden. Bei der Einzelplattformmethode kann ein Gate (Region E) um die fluoreszierenden Beads gesetzt werden.

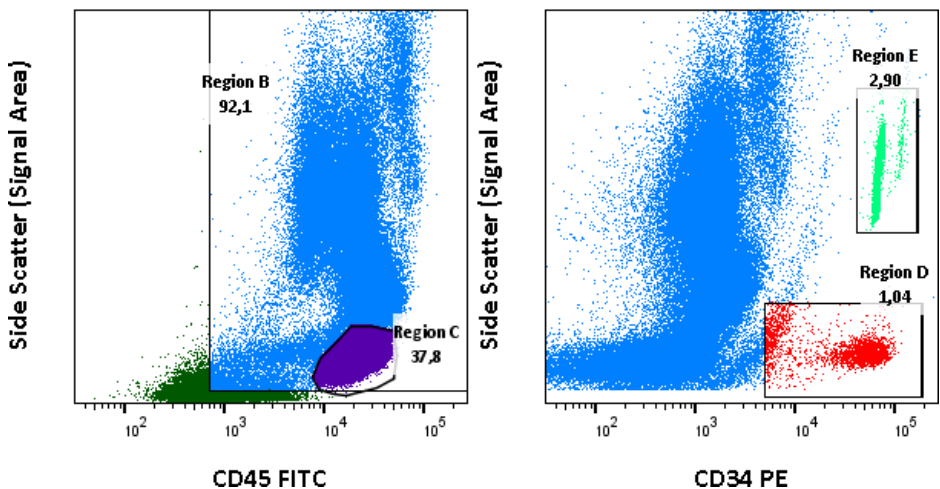

Bereinigen Sie CD34-positive Ereignisse aus der Region D, indem Sie eine **Region F** um einen undeutlichen CD45-positiven Zellcluster im SSC-A vs. CD45 FITC-Punktdiagramm mit Ereignissen aus der Region D platzieren, wie in Abbildung 3 links gezeigt.


Stellen Sie CD45<sup>+</sup> Lymphozyten (Region C) in SSC-A vs. Vorwärtsstreuung-Signalhöhe (FSC-H) als Punktdiagramm dar. Legen Sie ein neues Gate an, das CD45<sup>+</sup> Lymphozyten von kleineren Ereignissen und Debris abgrenzt (**Region G**), wie in Abbildung 3 rechts gezeigt.

**Abbildung 3** Das Bild links visualisiert die Entfernung nichtspezifischer CD34-Färbungen, also Blutplättchen oder Aggregate. Region F wurde verwendet, um spezifisch gefärbte Zellen abzugrenzen, die CD45<sup>dim</sup>SSCs<sup>low</sup> CD34<sup>+</sup> sind. Das Bild rechts veranschaulicht die Abgrenzung von CD45<sup>+</sup>-Lymphozyten (Region G) von Region C.

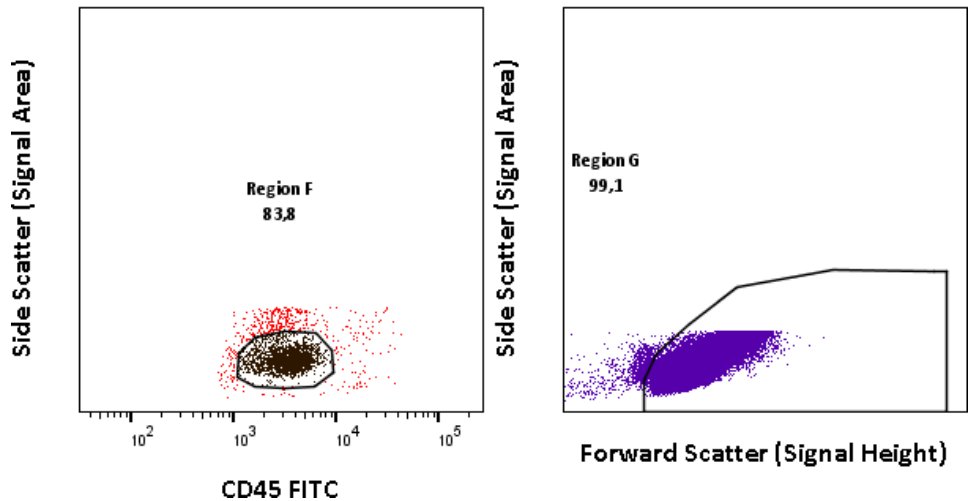

Kopieren Sie das Gate der **Region G** mit den Lymphozyten aus **Abb. 3** (rechtes Bild) und fügen Sie es in das Punktdiagramm SSC-A vs. FSC-H mit den Ereignissen der **Region F** ein und erstellen Sie **Region H**, um die CD34<sup>+</sup> Stammzellen von kleineren Ereignissen und Debris zu unterscheiden. Zellen aus Region F (Abbildung 3), die innerhalb des Gates von **Region H** gefunden wurden, stellen echte CD34<sup>+</sup> Stammzellen dar.

**Abbildung 4** Das Bild stellt eine Auswahl echter CD34<sup>+</sup> Stammzellen dar (Region H).

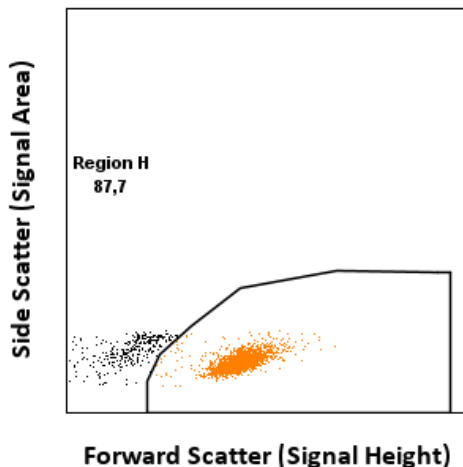


Nur für die Einzelplattformmethode:

Um sicherzustellen, dass das richtige Gate für die fluoreszierenden Beads (Region E) gesetzt wird, sollten die Kontrollgates (Region I, J, K in Abbildung 5 und 6) dargestellt werden.


Stellen Sie **alle Ereignisse** in CD34 PE vs. CD45 FITC dar und setzen Sie Regionen um den fluoreszierenden Mikropartikel-Zahlstandard zur Abgrenzung von Mikropartikeln aus BD TruCount™ (**Region I**) von Mikropartikeln aus Beckman Coulter Flow-Count™ (**Region J**).

**HINWEIS:** Die Größe der Counting Beads und die Fluoreszenzeigenschaften können je nach Hersteller unterschiedlich sein.

**Abbildung 5** Das Bild links zeigt Größe und Fluoreszenzeigenschaften der Beads im BD TruCount™ Röhrchen (Region I). Das Bild rechts zeigt Größe und Fluoreszenzeigenschaften der Beads in den BC Flow-Count™ Fluorospheres (Region J).

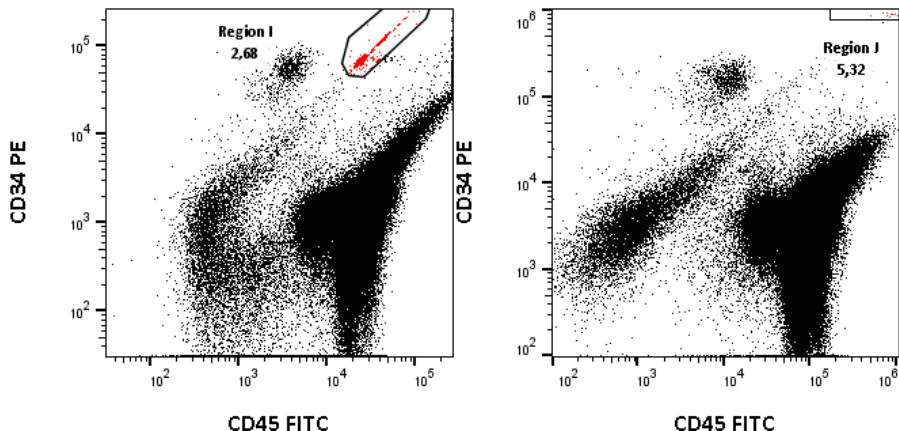

**Abbildung 6** Das Bild stellt alle Singulett-Counting Beads im Zeitverlauf (Region K) dar.

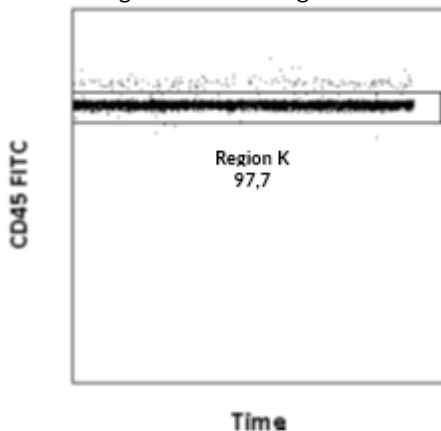

**HINWEIS:** Jede Inhomogenität in Region K (Störung bei der Erfassung, Abnahme der Fluoreszenz) sollte für eine Überprüfung in Betracht gezogen werden. Eine nicht homogene Erfassung von Ereignissen oder eine Erfassung, die nicht senkrecht zur CD45-FITC-Achse erfolgt, weist auf Probleme mit der Fluidik eines Durchflusssytometers hin.



## **Berechnung und Interpretation analytischer Ergebnisse – Einzelplattformmethode**

Verwenden Sie die folgenden Gleichungen für die prozentuale und absolute Zählung lebender CD34<sup>+</sup>-Stammzellen aus allen lebenden Leukozyten.

*Absolute Zählung lebender CD34<sup>+</sup>-Stammzellen pro 1 µl Blutmaterial:*

$$CD34^+ Abs = \frac{Region\ H}{Region\ E} \times \frac{P}{V} \times DF$$

*Bestimmung der absoluten Leukozytenzahl pro 1 µl Blutmaterial:*

$$WBC\ Abs = \frac{Region\ B}{Region\ E} \times \frac{P}{V} \times DF$$

*Bestimmung des Anteils lebender CD34<sup>+</sup>-Stammzellen aller lebenden Leukozyten:*

$$\% CD34^+ = \frac{CD34^+ Abs}{WBC\ Abs} \times 100$$

<i>CD34<sup>+</sup> Abs</i>	Absolute Zahl lebender CD34 <sup>+</sup> -Stammzellen pro 1 µl Blutmaterial
<i>WBC Abs</i>	Absolute Zahl lebender Leukozyten pro 1 µl Blutmaterial
<i>% CD34<sup>+</sup></i>	Prozentsatz lebender CD34 <sup>+</sup> -Stammzellen aller lebenden Leukozyten
<i>Region B</i>	Anzahl der Ereignisse in Region B (Leukozyten)
<i>Region H</i>	echte CD34 <sup>+</sup> -Stammzellen
<i>Region E</i>	Anzahl der Ereignisse in Region E (Mikropartikel)
<i>P</i>	Anzahl der Mikropartikel pro Test (im Teströhrchen vorhanden), angegeben vom Hersteller des Mikropartikels
<i>V</i>	Probenvolumen – 100 µl
<i>DF</i>	Verdünnungsfaktor (Verdünnung der Probe vor dem Färben); DF = 2 bedeutet, dass 1 Teil Blutmaterial (100 µl) mit 1 Teil PBS mit 0,5 % BSA (100 µl) verdünnt wurde.

## **Berechnung und Interpretation analytischer Ergebnisse – Doppelplattformmethode**

Verwenden Sie ein Hämatologie-Analysegerät, um die Leukozytenzahl pro µl-Probe zu bestimmen. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers des Hämatologie-Analysegeräts.

Verwenden Sie die folgenden Gleichungen für die prozentuale und absolute Zählung lebender CD34<sup>+</sup>-Stammzellen aus allen lebenden Leukozyten.

*Absolute Zählung lebender CD34<sup>+</sup>-Stammzellen pro 1 µl Blutmaterial:*

$$CD34^+ Abs = \frac{Region\ H}{Region\ B} \times WBC\ Abs \times DF$$

*Bestimmung des Anteils lebender CD34<sup>+</sup>-Stammzellen aller lebenden Leukozyten:*

$$\% \text{ CD34}^+ = \frac{\text{Region H}}{\text{Region B}} \times 100$$

<i>CD34<sup>+</sup> Abs</i>	Absolute Zahl lebender CD34 <sup>+</sup> -Stammzellen pro 1 µl Blutmaterial
<i>WBC Abs</i>	Absolute Zahl lebender Leukozyten pro 1 µl-Blutmaterial, bestimmt mit einem Hämatologie-Analysegerät
<i>% CD34<sup>+</sup></i>	Prozentsatz lebender CD34 <sup>+</sup> -Stammzellen aller lebenden Leukozyten
<i>Region B</i>	Anzahl der Ereignisse in Region B (Leukozyten)
<i>Region H</i>	Anzahl echter CD34 <sup>+</sup> -Stammzellen
<i>DF</i>	Verdünnungsfaktor (Verdünnung der Probe vor dem Färben); DF = 2 bedeutet, dass 1 Teil Blutmaterial (100 µl) mit 1 Teil PBS mit 0,5 % BSA (100 µl) verdünnt wurde.

## 11. Analytische Leistung

### Spezifität

Der Antikörper MEM-28 erkennt alle Leukozyten-Isoformen des menschlichen CD45 (Protein-Tyrosin-Phosphatase-Rezeptor Typ C). Die Spezifität des Antikörpers wurde durch einen HLDA-Workshop bestätigt (Workshop HLDA III <sup>(19)</sup>).

Der Antikörper 4H11[APG] erkennt das Klasse-III-Epitop des menschlichen CD34-Antigens (Mucosialin). Die Spezifität des Antikörpers wurde durch einen HLDA-Workshop bestätigt (Workshop HLDA V <sup>(20)</sup>).

### Genauigkeit

Die Genauigkeit der Methode wurde durch einen Vergleich des CD34 QuantiFlowEx Kits mit der gut dokumentierten Doppelplattformmethode (Cocktail aus einfarbigen konjugierten Antikörpern verschiedener Hersteller in Kombination mit einer Lysierlösung auf Amoniumchloridbasis) eines anerkannten klinischen Labors durch parallele Färbung von 75 Blut- oder Gewebeproben bestimmt, die sowohl mit dem BD FACSCanto™ II Durchflussszytometer als auch mit dem Beckman Coulter Navios Durchflussszytometer analysiert wurden (Tabelle 4, 5, 6). Die Parameter der linearen Regressionsanalyse sind in Tabelle 4–6 aufgeführt.

**Tabelle 4** Lineare Regressionsanalyse für CD34+ Stammzellen in peripherem Blut (Vergleich des CD34 QuantiFlowEx Kits mit der anerkannten klinischen Labormethode), analysiert mit dem BD FACSCanto™ II Durchflusszytometer oder dem Beckman Coulter Navios Durchflusszytometer.

Vergleich ED7080 mit anerkannter Methode						
Peripheres Blut						
Zielpopulation	Einheit	n	Steigung	Schnittpunkt	r <sup>2</sup>	Bereich
CD34 <sup>+</sup> CD45dim	%	30	0.9743	-0.0005	0.9967	0.02 - 2.22
	Zellen/µl	30	0.9757	-0.4106	0.9947	0.24 - 468

**Tabelle 5** Lineare Regressionsanalyse für CD34+ Stammzellen in Leukaphereseprodukten (Vergleich des CD34 QuantiFlowEx Kits mit der anerkannten klinischen Labormethode), analysiert mit dem BD FACSCanto™ II Durchflusszytometer oder dem Beckman Coulter Navios Durchflusszytometer.

Vergleich ED7080 mit anerkannter Methode						
Leukaphereseprodukte (PBSC)						
Zielpopulation	Einheit	n	Steigung	Schnittpunkt	r <sup>2</sup>	Bereich
CD34 <sup>+</sup> CD45dim	%	25	0.9999	-0.0061	0.9925	0.81 - 10.56
	Zellen/µl	25	0.9844	45.762	0.9918	1392 - 17497

**Tabelle 6** Lineare Regressionsanalyse für CD34+ Stammzellen in Knochenmark (Vergleich des CD34 QuantiFlowEx Kits mit der anerkannten klinischen Labormethode), analysiert mit dem BD FACSCanto™ II Durchflusszytometer oder dem Beckman Coulter Navios Durchflusszytometer.

Vergleich ED7080 mit anerkannter Methode						
Knochenmark						
Zielpopulation	Einheit	n	Steigung	Schnittpunkt	r <sup>2</sup>	Bereich
CD34 <sup>+</sup> CD45dim	%	20	0.9385	0.0467	0.9954	0.24 - 3.14
	Zellen/µl	20	1.028	-4.1351	0.9991	47 - 1708

### Linearität

Die Linearität der Methode wurde an einem „Buffy Coat“-Blutderivat eines gesunden Blutspenders überprüft, das mit 11 aufeinanderfolgenden (seriellen; 2-fachen) Verdünnungen von CD34+-Zellen (KG-1) innerhalb eines Tages von einem Bediener auf einem BD FACSCanto™ II-Durchflusszytometer analysiert wurde. Die lineare Regression wurde für die Bewertung des erwarteten Wertes gegen den

mittleren wiedergefundenen Wert bei jeder Verdünnung verwendet. Der Linearitätsbereich ist in Tabelle 7 aufgeführt.

**Tabelle 7**    Linearität des Geräts auf BD FACSCanto™ II

BD FACSCanto™ II					
Zielpopulation	Einheit	Steigung	Schnittpunkt	r <sup>2</sup>	Bereich
CD34 <sup>+</sup> CD45dim	Zellen/μl	1.0648	4.4804	1.0000	3.64–2862

**Wiederholbarkeit**

Die Wiederholbarkeit des Testverfahrens wurde an 10 Blutproben in Hexaplikaten gemessen. Die Proben wurden mit dem Durchflusszytometer BD FACSLyric™ und dem Durchflusszytometer Sysmex XF-1600™ analysiert. Die Variationskoeffizienten (CV) sind in den folgenden Tabellen aufgeführt (Tabelle 8 und 9).

**Tabelle 8**    Wiederholbarkeit des Geräts auf BD FACSLyric™

BD FACSLyric™					
Zielpopulation	Einheit	n	Bewerteter Wertebereich	SD	CV (%)
CD34 <sup>+</sup> CD45dim	%	10	0.03-0.07	0.0035	7.2
	Zellen/μl	10	8-20	1.0	7.2

**Tabelle 9**    Wiederholbarkeit des Geräts auf Sysmex XF-1600™

Sysmex XF-1600™					
Zielpopulation	Einheit	n	Bewerteter Wertebereich	SD	CV (%)
CD34 <sup>+</sup> CD45dim	%	10	0.03-0.07	0.0047	9.4
	Zellen/μl	10	7-20	1.2	9.4

**Reproduzierbarkeit**

Die Reproduzierbarkeit des Tests wurde an einer stabilisierten Blutprobe gemessen (CD-Chex CD34, Level 3) unter den gleichen Bedingungen für 15 Tage. Die Proben wurden mit dem Durchflusszytometer BD FACSLyric™ und dem Durchflusszytometer Sysmex XF-1600™ analysiert. Die Variationskoeffizienten (CV) sind in den folgenden Tabellen aufgeführt (Tabelle 10 und 11).

**Tabelle 10** Reproduzierbarkeit des Geräts auf BD FACSLyric™

Reproduzierbarkeit – BD FACSLyric™						
Probentyp	Erwarteter Bereich (%)	Erwarteter Mittelwert (%)	Erhaltener Mittelwert (%)	SD	CV (%)	Gemessener Wertebereich
CD-Chex CD34, Level 3	1.35 – 1.95	1.65	1.67	0.06	3.6	1.46-1.70

**Tabelle 11** Reproduzierbarkeit des Geräts auf Sysmex XF-1600™

Reproduzierbarkeit – Sysmex XF-1600™						
Probentyp	Erwarteter Bereich (%)	Erwarteter Mittelwert (%)	Erhaltener Mittelwert (%)	SD	CV (%)	Gemessener Wertebereich
CD-Chex CD34, Level 3	1.35 – 1.95	1.65	1.54	0.04	2.8	1.48-1.62

**HINWEIS:** Für die Durchflusszytometrieanalyse wurden folgende Durchflusszytometer inklusive Softwareversion verwendet:

BD FACSCanto™ II	BD FACSDiva Software – Version 8.0.2
BD FACSLyric™	BD FACSSuite Software – Version 1.5
Sysmex XF-1600™	IPU Software – Version 0(0.09-00)
Navios EX	Navios Ex Software v2.0

Für die absoluten Zellzahlen unter Verwendung der Dual-Plattform-Methode wurde ein Hämatologieanalysator mit den folgenden Spezifikationen verwendet:

Sysmex XN-1000™	IPU Software – Version 00-22(164)
-----------------	-----------------------------------

Zur Auswertung der Messdaten wurde folgende Analyseplattform verwendet:  
FlowJo™ (Becton, Dickinson and Company) - Version 10.9.0

## 12. Klinische Leistung

Klinische Daten wurden an einer klinischen Einrichtung erhoben. Die klinische Leistung des Geräts ED7080 wurde durch Vergleich des CD34 QuantiFlowEx Kit mittels einer anerkannten internen klinischen Labormethode ermittelt. Es wurden 75 Proben getestet, darunter peripheres Blut, Leukaphereseprodukte und Knochenmarkproben. Der Unterschied zwischen den Methoden betrug bei 67 von 75 Bestimmungen weniger als 10 % d. h. die mit beiden Methoden erzielten Ergebnisse waren weitgehend identisch. Die relativen Unterschiede zwischen den

Methoden lagen zwischen -13 % und +11 %. Diese Daten wurden mit Hilfe der linearen Regressionsanalyse und der Bland-Altman-Bewertung der Übereinstimmung zwischen den Methoden (relative Differenz der Zählungen) verglichen, was eine sehr gute Übereinstimmung zwischen den Methoden ergab. Der Durchschnittswert der relativen Unterschiede in der Zählung zwischen zwei Methoden beträgt 1 % und ein Standardfehler von 6 %.

In den Leitlinien für die Bestimmung von CD34+ HSC wird empfohlen, die Ergebnisse mit einer maximal akzeptablen relativen Differenz von bis zu 10 % zwischen Duplikaten zu vergleichen<sup>(21)</sup>. Gemäß diesen Empfehlungen liefern diese Methoden Daten, die als gleichwertig angesehen werden können.

### **13. Erwartete Werte**

Das Gerät ist für den Nachweis und die Zählung aller lebensfähigen hämatopoetischen Stammzellen vorgesehen und stellt selbst keine Diagnose, bei der ein normaler Wertebereich festgestellt werden könnte.

Für drei Probentypen werden die aus klinischen Studien ermittelten Wertebereiche in Abschnitt 11 (Analyseleistung), Teil „Genauigkeit“, dargestellt.

### **14. Einschränkungen**

Das Gerät ist nicht für die Identifizierung und Zählung von mesenchymalen, neuralen, epithelialen und Hautstammzellen vorgesehen.

Proben mit sehr hoher Anzahl an weißen Blutkörperchen sollten vor der Färbung in PBS verdünnt werden, um eine Leukozytenzahl von weniger als  $20 \times 10^3$  Zellen/ $\mu$ l zu erhalten<sup>(22)</sup>.

### **15. Referenzen**

- 1) Sutherland DR, et. al. The ISHAGE guidelines for CD34+ cell determination by flow cytometry. International Society of Hematotherapy and Graft Engineering. J Hematother. 1996 Jun;5(3):213-26. doi: 10.1089/scd.1.1996.5.213.
- 2) Tate J, et al. Interferences in immunoassay. Clin Biochem Rev. 2004 May; 25(2):105-20.
- 3) Selby C. Interference in immunoassay. Ann Clin Biochem. 1999 Nov;36(6):704-21. doi: 10.1177/000456329903600603.
- 4) Frengen J, et al. Demonstration and minimization of serum interference in flow cytometric two-site immunoassays. Clinical Chemistry. 1994 March;40(3):420-425, <https://doi.org/10.1093/clinchem/40.3.420>.
- 5) Htun NM, et al. Near-infrared autofluorescence induced by intraplaque hemorrhage and heme degradation as marker for high-risk atherosclerotic plaques. Nat Commun. 2017; 8(1):75. doi:10.1038/s41467-017-00138-x.

- 6) Lecoeur H, et al. Comparative analysis of flow cytometric methods for apoptosis quantitation in murine thymocytes and human peripheral lymphocytes from controls and HIV-infected persons Evidence for interference by granulocytes and erythrocytes. *Journal of Immunological Methods*. 1996;198(1):87-99. [https://doi.org/10.1016/0022-1759\(96\)00148-2](https://doi.org/10.1016/0022-1759(96)00148-2).
- 7) XUE Y, et al. Interference of high levels of bilirubin on lymphocyte subset determination in peripheral blood by flow cytometry and its elimination methods[J]. *Laboratory Medicine*. 2022; 37(12): 1169-1173. Doi: 10.3969/j.issn.1673-8640.2022.12.013.
- 8) Higgins J, et al. Evaluation of a single-platform technology for lymphocyte immunophenotyping. *Clin Vaccine Immunol*. 2007 Oct;14(10):1342-8. doi: 10.1128/CVI.00168-07.
- 9) Lam WK, et al. Resolution of platelet count interference due to cytoplasmic fragments of leukaemic cells by flow cytometry in acute myeloid leukaemia. *Int J Lab Hematol*. 2022 Dec;44(6):983-985. doi: 10.1111/ijlh.13859.
- 10) de Jonge G, et al. Interference of in vitro hemolysis complete blood count. *J Clin Lab Anal*. 2018 Jun;32(5):e22396. doi: 10.1002/jcla.22396.
- 11) Kricka LJ. Human anti-animal antibody interferences in immunological assays. *Clin Chem*. 1999 Jul;45(7):942-56.
- 12) Achour L, et al. CD4-CCR5 interaction in intracellular compartments contributes to receptor expression at the cell surface. *Blood* 2009;113(9): 1938–1947. doi: 10.1182/blood-2008-02-141275.
- 13) Van Caeneghem Y, et al. Antigen receptor-redirected T cells derived from hematopoietic precursor cells lack expression of the endogenous TCR/CD3 receptor and exhibit specific antitumor capacities. *Oncol Immunology*. 2017;6:3, doi: 10.1080/2162402X.2017.1283460.
- 14) Stronkhorst A, et al. CD4 Antibody Treatment in Crohn's Disease, *Scandinavian Journal of Gastroenterology*, 1992;27(194):61-65, doi: 10.3109/00365529209096029.
- 15) Zinzani, PL, et al. Anti-CD19 monoclonal antibodies for the treatment of relapsed or refractory B-cell malignancies: a narrative review with focus on diffuse large B-cell lymphoma. *J Cancer Res Clin Oncol*. 2022;148:177–190. doi: 10.1007/s00432-021-03833-x.
- 16) Whiteman KR, et al. Lorvotuzumab mertansine, a CD56-targeting antibody-drug conjugate with potent antitumor activity against small cell lung cancer in human xenograft models. *MAbs*. 2014 Mar-Apr;6(2):556-66. doi: 10.4161/mabs.27756.

- 17) Bartels EM, et al. Rheumatoid factor and its interference with cytokine measurements: problems and solutions. *Arthritis*. 2011;2011:741071. doi: 10.1155/2011/741071.
- 18) van Ierssel SH, et al. Endothelial Microparticles (EMP) for the Assessment of Endothelial Function: An In Vitro and In Vivo Study on Possible Interference of Plasma Lipids. *PLOS ONE*. 2012;7(2):e31496. doi: 10.1371/journal.pone.0031496.
- 19) McMichael AJ, et al. eds. Leucocyte Typing III. White Cell Differentiation Antigens. Oxford: Oxford University Press, 1987.
- 20) Kishimoto T, et al. eds. Leucocyte Typing VI. New York: Garland Publishing, Inc., 1997.
- 21) Whitby A, et. al. ISHAGE protocol: are we doing it correctly? *Cytometry B Clin Cytom*. 2012 Jan;82(1):9-17. doi: 10.1002/cyto.b.20612. Epub 2011 Sep 13.
- 22) Keeney M, et al. "Single platform flow cytometric absolute CD34+ cell counts based on the ISHAGE guidelines. International Society of Hematotherapy and Graft Engineering." *Cytometry* vol. 34,2 (1998): 61-70. doi: 10.1002/(SICI)1097-0320(19980415)34:2<61::AID-CYTO1>3.0.CO;2-F.

## **16. Kurzbericht über Sicherheit und Leistung**

Der Kurzbericht über Sicherheit und Leistung wird in der Eudamed-Datenbank unter <https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/home> verfügbar sein. Bis dahin ist der Kurzbericht über Sicherheit und Leistung auf Anfrage erhältlich.

## **17. Verwendung von Marken Dritter**

BD FACSCanto™ II, BD FACS Lyric™, Trucount™, FlowJo™ sind eingetragene Marken von Becton, Dickinson and Company, Sysmex XF-1600™ ist eine eingetragene Marke von Sysmex Corporation CD-Chex CD34® ist eine eingetragene Marke von Streck, Navios™, Flow-Count™ Fluorospheres sind eingetragene Marken von Beckman Coulter.

## **18. Revisionsverlauf**

Version 5, ED7080\_IFU\_v5

Neues IFU-Layout gemäß den Anforderungen der IVDR (EU) 2017/746. Hinzufügen der ID-Nummer der benannten Stelle. Neues Kapitel Nummer 16. Kurzbericht über Sicherheit und Leistung hinzugefügt. Zusammenfassung zu Sicherheit und Leistung. Änderung des Textes zur Gating-Strategie, es wurden Empfehlungen für das Einzelplattform-Gating abgegeben. Klärung des Begriffs Verdünnungsfaktor. Änderungen in den Kapiteln 11., 12., 14. und 15. (Hinzufügung von analytischen und klinischen Daten).



## **19. Hersteller**

EXBIO Praha, a.s.  
Nad Safinou II 341  
25250 Vestec  
Tschechische Republik

### **Kontaktinformationen**

info@exbio.cz  
technical@exbio.cz  
orders@exbio.cz  
www.exbio.cz

## **20. Autorisierte Vertreter**

N/A

**HINWEIS:** Alle schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde vor Ort zu melden.